

# Flexible CURETTE FORCEPS

フレキシブル 鋭匙 鉗子



# 未踏のエリアへ。 「鉗子革命」はじまる。

見えているのに、届かない。

近年、発達のめざましい内視鏡を用いた手術での問題点を解決する  
画期的な鉗子が誕生しました。

柔軟な屈曲と360度の回転が可能な先端部分が、  
今まで届かなかった脳内の狭い場所にも的確にアプローチ。  
この鉗子で、内視鏡手術は新たなステージへ。



先端屈曲部



## 術具の仕様

商品コード	07-797-01
商品名	フレキシブル鋭匙鉗子
JANコード	4946329139839
クラス分類	I
許可番号	13B1X00306
規格	カップ径 φ3.0mm
全長	335mm (有効長240mm)
直径	3mm
屈曲角度	±75度 (真っ直ぐの状態を0度として)
回転	±360度以上
屈曲長さ	パイプ中心から先端部まで10mm

先端部が、左右各75度までしなやかに首を振ります

## 屈曲機能

### 開発コンセプト

- ・今までアプローチが困難だった脳内の部位に到達でき、腫瘍などの摘出操作ができること。  
(経鼻的内視鏡下下垂体腫瘍摘出術など)
- ・手術器械の可動が極端に制限される狭い場所においても、優れた操作性が維持できること。
- ・片手で簡単に操作でき、医師の手術のスピードやクオリティに影響を与えないこと。

## 回転機能

## 屈曲維持機能

先端部が、左回り・右回りに各360度以上回転します

屈曲した位置と姿勢をそのまま維持することができます



### <操作方法>

フレキシブル鋭匙鉗子には、合計3本のワイヤが内蔵されており、これらが機能的に作動することで、今までにない柔軟で緻密な動きが可能となりました。

#### 1. 屈曲操作

屈曲操作部を回転させることで、先端部は左右に首を振ります。また、屈曲操作部には屈曲位置を保持するためのロック機構が備えられています。

#### 2. 回転操作

回転操作部を回転させることで、先端部が左回り・右回りに各360度以上回転します。

#### 3. 先端部開閉

先端部開閉レバーを握りこむことで、先端部が閉じます。握りこむ力を緩めると、先端部は開いた状態になります。

# ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

## 【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F  
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK小田急ビル2F  
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8062 新潟市中央区西堀前通1-702 西堀一番町ビル6F  
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東地区 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13  
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F  
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区鞠本町1-10-24 三共本町ビル7F  
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0045 広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F  
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F  
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

## 【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3  
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

## 【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068

## 【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

## 【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

## 【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

0708-2000-CO-001-0609