

MODULAR TABLE SYSTEM



Spinal 先進の脊椎手術ポジショニング

Mizuho OSIモジュラーテーブルシステムのスパイナルテーブルトップは、脊椎手術でのポジショニングにおける先進テクノロジーです。

- 椎弓切除術
- 除圧
- 骨切り術
- 前方／後方固定
- 脊椎変形矯正術
- 頸椎前方／後方アプローチ
- 椎体形成術




抜群のCアームのアクセス



Cアームによる、脊椎前方／後方手術中のX線撮影が容易です。



側方撮影では、Cアームを回転させることなくサジタル像の撮像が可能です。テーブルの横転はスムーズで、Cアームにより滅菌野が汚染する可能性を抑えます。

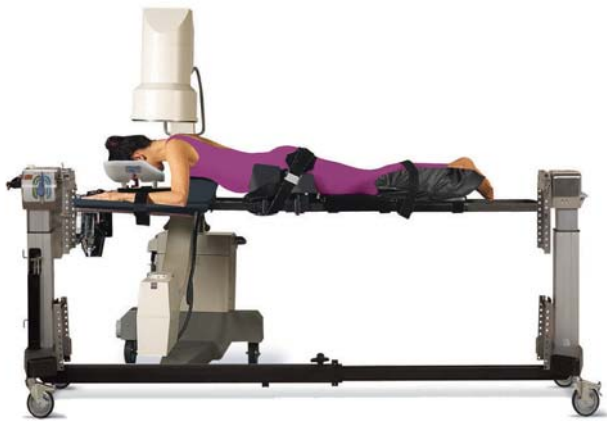

頸椎手術



頸椎を安定させた状態での腰椎手術

優れたX線透過性

- 優れたX線透過性をもつフレームとサポートパッド
- 撮影への支障が少なく、Cアームとの一体化を実現
- 手術中の撮影（前面、後方、側方、斜方）が可能
- 他のX線透視法にも対応



アドバンスドコントロール・パッドシステム™を装着した
スパイナルテーブルトップ

出血を最小限に抑制

- 大静脈の除圧
- 硬膜外静脈からの出血を最小限に抑制
- 術野視野の向上



回転機能

体位変換時に患者をベッドから降ろす必要がありません。180°回転機能により、脊椎固定術の体位も容易です。透視用テーブルトップで仰臥位にて前方固定術を行った後、スパイナルテーブルトップで患者を挟むようにセッティングして180°回転させます。この状態で透視用テーブルトップを取り外せば、脊椎後方や骨盤手術のためのアクセスが可能になります。

アドバンスド・コントロール・パッド・システム™ (オプション)

- 荷重部位を手作業で刺激する作業から手術スタッフを解放
- 自動的に定期的にマッサージ動作を実施
- 手術中に股関節部と大腿部の荷重部位を刺激
- 患者の快適さと安全性をサポート

最適なポジショニング

- Tempur- Pedic®メディカル・テクノロジーによるアドバンスドコントロール・パッドシステム™は、患者の快適さと安全性をサポートします。
- カスタマイズされたサポートパッドは、X線透過性の複合カーボン製フレームに取り付けて、患者のポジショニングを充実させます。

180° 回転可能

- 患者を安全かつ効率的に回転
- 腹臥位でも仰臥位でも水平軸回転により迅速に対応
- 脊椎、骨盤をあらゆる角度から透視可能な手術台

ORDERING INFORMATION

商品コード	JANコード	商品名	クラス 分類
02-142-04	4946329139136	スパイナルテーブルトップシステムセット(STS)	I
02-142-00	4946329040456	透視TBトップセット(5927)	
02-142-52	4946329040500	I型脚台(伸縮可能)(5803)	

仕様 サイズはすべて近似値です。

モジュラー・トップ

テーブルトップ長	213 cm
テーブルトップ幅	脊椎テーブルトップ 43cm 透視テーブルトップ 55 cm
許容患者体重	227 kg

モジュラー・ベース

テーブルトップまでの床上高さ	69 cm ~ 122 cm
ベース幅	81cm
ベース長	259 cm
収納時ベース長	163 cm
トレンデレンブルク/逆トレンデレンブルク	10°
横転角度	25°

02-142-04 スパイナルテーブルトップシステムセット(STS) 構成品

02-142-91	スパイナルテーブルトップ(SST/226.8kg)
02-143-02	Hフレーム用 横止めピン(5840-361)
02-143-03	Hフレーム(5840-370)
02-143-54	STS調整式上肢台(5579)
02-144-01	脊椎TB用 胸部パッド(5840-7569)
02-144-14	頭部支持板(5840-277)
02-144-15	脊椎テーブル用脚板パッド
02-144-16	ベクター式 頸椎牽引調整器(5840-389)
02-144-17	脚支持用シート(5840-450)
02-144-18	モジュラーテーブル用備品カート(5864)
02-144-21	固定ベルト 60インチ(5840-43)
02-144-22	安全ベルト 90インチ(5840-44)
02-144-23	臀部用ベルト(5840-45)
02-144-26	STS胸支持プレート(580)
02-144-43	STSテンピュール式尻部ゲルパッド大(6957-3)
02-144-44	STSテンピュール式尻部ゲルパッド中(6957-4)
02-144-45	STSテンピュール式尻部ゲルパッド小(6957-5)
02-144-46	STSテンピュール式腿部ゲルパッド右(6957-6)
02-144-07	STSテンピュール式腿部ゲルパッド左(6957-7)
02-144-89	プロンビューアジャスタブルミラーヘルメットセット(STS用)
02-144-95	STS患者保護キットPVクッション付6組(5808PV)

02-142-00 透視TBトップセット(5927) 構成品

02-142-80	透視テーブルトップパッド(5840-7028)
02-142-90	透視用テーブルトップフレーム(5840-726)
02-143-02	Hフレーム用 横止めピン(5840-361)
02-143-03	Hフレーム(5840-370)
02-143-78	患者安全ベルト(5855-550)

02-142-52 I型脚台(伸縮可能)(5803) 構成品

02-144-64	STS電動用操作ボックス(6807-1)
-----------	----------------------

共通オプション

02-144-37	STS患者保護キット(5808) 6個入
02-144-29	デュアル胸部パッドセット(5840-820)
02-143-76	脊椎テーブル用ウィルソンフレーム 5321G
02-143-18	ウィルソンフレーム用患者保護キットPVクッション付6個入(5322PV)
02-143-10	ウィルソンフレーム用患者保護キット6個入(5322)
02-144-62	STSレトラクターアダプター(5888)
02-143-71	メイフィールドヘッドレストカバー(5873)
02-143-72	スパイナルトップアダプター2個組(5846)
02-143-66	頸部マネージメントベース(5979-1)
02-143-64	ラジオールセントメイフィールド用アダプター(5979-200)
02-143-63	ラジオールセントDORO用アダプター(5979-300)
02-143-04	クラーク型 固定金具(5393)
02-143-06	サイドレールソケット(5394)
02-147-24	Tempur-Pedic体位枕 スタンダード(6946)
02-147-23	Tempur-Pedic体位枕 ラージ(6947)

透視TBセット専用オプション

02-143-75	透視テーブル用ウィルソンフレーム 5319G
02-147-21	透視テーブルサイドレールアダプター(6977-959)
02-143-51	STS上肢台(5356)
02-143-52	STS交差式上肢台(5857)
02-143-50	STS側臥位用上肢台セット(5364)
02-143-31	ラテラルポジショナー(5300)

アドバンスドコントロール・パッドシステム™ の構成

Mizuho OSI ShearGuard® およびTempur-Pedic® メディカル・テクノロジー
速度調節式コントローラ
ACP大腿パッド(右/左)
ACP臀部パッド(大/中/小)
クイック・コネクタACPチューブ(1ケース)

特定保守管理医療機器	類 別: 機械器具(01)手術台及び治療台 一般的名称: 汎用電動式手術台 販 売 名: OSIモジュラーテーブルシステム JMDNコード: 36867020	届出番号: 13B1X00306Y10037
------------	--	------------------------

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

北海道	TEL 011-716-4731	東 北	TEL 022-227-1688
新 潟	TEL 025-229-5458	北 関 東	TEL 03-3815-3193
東 海	TEL 052-732-7130	関 西	TEL 06-6444-3840
中 国	TEL 082-241-8826	九 州	TEL 092-431-5022

【関東圏 販売網(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

ミズホアーバン株式会社	〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
	TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【本 社】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
特 販 事 業 部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【テクニカルサービスセンター】

〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13
訪 問 修 理 受 付 TEL 043-481-3367
お 預 り 修 理 受 付 TEL 043-481-3368

製造業者 

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

PDF-0000-FB-001-1603



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。