

水性潤滑・防錆保守剤 ミルクテック[®]S 「濃厚液」

ミルクテックSは、流動パラフィンあるいはシリコン油などの油剤に代わる日本初の水性潤滑・防錆保守剤として開発されました。油剤による手術器具の滅菌前の処理で生じがちであったシミ・変色・錆などを防ぐだけでなく、手術器具の耐用年数も延ばします。



性能および効果

金属の表面を保護します。

手術器械器具の関節が潤滑性を増し、作動の自在性を保持します。

鋭利な刀縁部を有する器具を保護し、鈍化を防止します。

滅菌時の熱伝導は十分にゆきわたり、従来の油剤使用時にみられる細菌の隠蔽性はなく、器具の滅菌が完全に行えます。

変色、腐食、サビ等を減少させます。

手術器具のメンテナンス作業を効率化し、 滅菌効果を高める水性潤滑・防錆保守剤。



本質・性状

ミルクテックSは、精製した軽質流動パラフィン界面活性剤で独特な精剤技術により可溶・乳化したものです。

そのため、ミルクテックS粒子は極めて微粒子状で水中に可溶・分散されています。

恒数	ミルクテック®S「濃厚液」
比重(25℃)	0.97～0.98
pH	7.5～8.0

商品コード	JANコード	商品名
08-395-01	4946329089608	ミルクテックS 4000cc 4本入

ご注意

- ミルクテックS「濃厚液」は眼に入ると僅かに刺激があるので、そのような場合はすぐに眼を水洗いしてください。
- ミルクテックSを誤って飲用しないでください。
- ミルクテックSは、洗剤、殺菌剤ではありません。
- ミルクテックSは凍結すると融解時、分離を起こすので、冬季ある寒冷時、保存にご注意ください。(禁凍結)
- 処理前の洗浄が不十分な場合、斑点として残る事がありますのでご注意ください。

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
 販 売 事 業 部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 販 売 マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 販 売 技 術 部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 特 販 事 業 部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【 営 業 拠 点 】
 北 海 道 TEL 011-716-4731 東 北 TEL 022-227-1688
 新 潟 TEL 025-229-5458 北 関 東 TEL 03-3815-3193
 東 海 TEL 052-732-7130 関 西 TEL 06-6444-3840
 中 国 TEL 082-241-8826 九 州 TEL 092-431-5022

【 関 東 圏 販 売 網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県) 】
 ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13
 訪 問 修 理 受 付 TEL 043-481-3367
 お 預 り 修 理 受 付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2009-PDF-MIZUHO-000-2009



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。